



■ MÓDULO 1.5 | 2.0

Sistema
Craniomaxilofacial



Soluções inovadoras para a vida



■ MÓDULO 1.5 | 2.0

Registro ANVISA 80455630030

○ SISTEMA CRANIOMAXILOFACIAL MÓDULO 1.5 | 2.0 TRAUMEC

foi projetado para promover uma fixação rápida e segura nos mais variados procedimentos que abrangem a especialidade.

É composto por implantes e instrumentais de alta tecnologia e destaca-se pela qualidade e design, sempre focados na inovação tecnológica e busca constante pelas tendências e necessidades do mercado mundial.

A diversidade geométrica das placas e a variedade de configurações dos estojos agrega versatilidade e precisão, oferecendo soluções completas tanto para traumas como para cirurgias ortognáticas.

Parafusos

- Disponíveis nas opções autoperfurantes e autoroscantes com encaixe cruciforme, garantindo total segurança, rapidez e otimização do procedimento cirúrgico.
- Manufaturados em Titânio ASTM F-136 (Ti 6AL 4V ELI)



Parafusos autoferfurantes e autoroscantes
manufaturados em Titânio



Placas

- Placas de design inovador com baixo perfil, de fácil modelagem e adaptação.
- Manufaturadas em Titânio ASTM F-67 (TI puro grau 2)



Indicações

- Osteossíntese de fraturas do terço médio e superior da face;
- Osteossíntese de fraturas de noe;
- Osteossíntese de osteotomias corretivas em tratamentos de deformidades;
- Fixação de enxertos em cirurgias de reconstrução do segmento superior e médio do esqueleto facial.
- Ampla variedade de geometrias que atendem às mais variadas necessidades clínicas;
- Parafusos autoperfurante e autoroscante em Titânio ASTM F-136 (TI 6AL 4V ELI)
- Placa em Titânio TiCp ASTM F67

SISTEMA CRANIOMAXILOFACIAL

MÓDULO 1.5



Micro placa reta

4 furos	PA.01.03.0001
6 furos	PA.01.03.0003
10 furos	PA.01.03.0007
16 furos	PA.01.03.0013



Micro placa reta ponte

6mm - 4 furos	PA.01.03.0577
10mm - 4 furos	PA.01.03.0579
6mm - 6 furos	PA.01.03.0581
10mm - 6 furos	PA.01.03.0583



Micro placa L ponte 6mm 4 furos

direita	PA.01.03.0326
esquerda	PA.01.03.0327



Micro placa T ponte


6mm - 4 furos	PA.01.03.0597
6mm - 5 furos	PA.01.03.0601
8mm - 5 furos	PA.01.03.0602

Micro placa L ponte 8mm 4 furos

direita	PA.01.03.0328
esquerda	PA.01.03.0329

Micro placa L ponte 10mm 4 furos

direita	PA.01.03.0330
esquerda	PA.01.03.0331

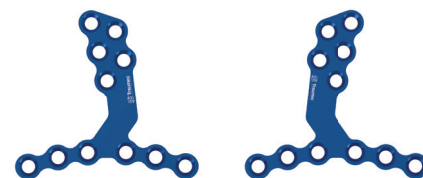

Micro placa Lefort 11 furos #0,6mm

esquerda	PA.01.03.0398
direita	PA.01.03.0399



Micro placa L oblíqua ponte 8mm 4 furos

direita	PA.01.03.0352
esquerda	PA.01.03.0353

Micro placa Lefort 11 furos - avanço 2mm #0,6mm

esquerda	PA.01.03.0400
direita	PA.01.03.0401

Micro placa L oblíqua ponte 8mm 5 furos

direita	PA.01.03.0360
esquerda	PA.01.03.0361

Micro placa Lefort 11 furos - avanço 4mm #0,6mm

esquerda	PA.01.03.0404
direita	PA.01.03.0405



Micro placa orbital

8 furos	PA.01.03.0558
10 furos	PA.01.03.0559

Micro placa Lefort 11 furos - avanço 8mm #0,6mm

esquerda	PA.01.03.0412
direita	PA.01.03.0413

* Disponibilidade de outras medidas sob consulta.



Micro placa trevo

PA.01.03.0637



Micro placa X ponte

5mm

PA.01.03.0638

9mm

PA.01.03.0640




Micro placa Y ponte

8mm - 5 furos

PA.01.03.0645

10mm - 5 furos

PA.01.03.0646

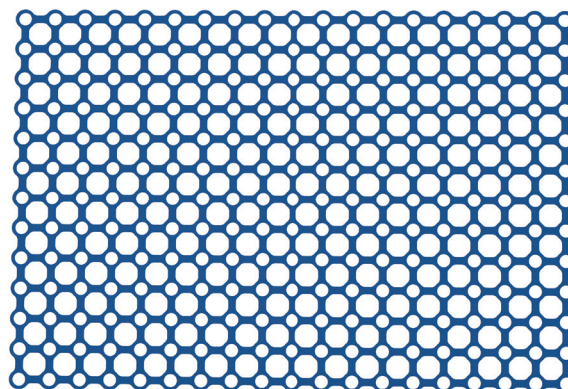

Micro tela TR 50,6 x 74,6mm #0,3mm

PA.01.03.0651

PARAFUSOS

Parafuso cortical AP 1,5 TI - cross-drive



4 mm

PA.01.03.0245

5 mm

PA.01.03.0246

6 mm

PA.01.03.0247

8 mm

PA.01.03.0249

Parafuso cortical 1,5 TI - cross-drive



10 mm

PA.01.03.0046

12 mm

PA.01.03.0048

14 mm

PA.01.03.0050

16 mm

PA.01.03.0052

Parafuso cortical AP 1,7 TI - cross-drive (emergência)



5 mm

PA.01.03.0058

6 mm

PA.01.03.0059

8 mm

PA.01.03.0061

10 mm

PA.01.03.0063

12 mm

PA.01.03.0065

* Outros comprimentos sob consulta.

ORIENTAÇÕES PARA INSERÇÃO DE PARAFUSOS DO SISTEMA BUCOMAXILO FACIAL 1.5

PARAFUSO CORTICAL AP 1.5 CROSS DRIVE (AUTOPERFURANTE)



Não é indicada a perfuração com broca

PARAFUSO CORTICAL 1.5 CROSS DRIVE (AUTOROSCANTE)



Perfurar com broca 1.1mm

IMPORTANTE

Durante o período de consolidação óssea devem ser evitadas pressões excessivas sobre o implante, de modo a prevenir falha no desempenho do sistema de fixação. A fixação em osso cortical é essencial para que ocorra estabilidade primária. A ausência ou fina espessura de osso cortical, poderá resultar em falha no desempenho do sistema de fixação. Para inserção dos parafusos AP autoperfurantes 1,5 não é recomendada a perfuração antes da inserção. É fundamental a irrigação local durante o processo de perfuração para minimizar riscos de complicações cirúrgicas, como osteonecrose térmica.

SISTEMA CRANIOMAXILOFACIAL

MÓDULO 2.0



Mini placa reta

4 furos	PA.01.03.0014
6 furos	PA.01.03.0016
12 furos	PA.01.03.0022
16 furos	PA.01.03.0022



Mini placa reta ponte

13,5mm - 4 furos	PA.01.03.0022
9mm - 6 furos	PA.01.03.0030
13,5mm - 6 furos	PA.01.03.0033



Mini placa para mento Chin

2 mm	PA.01.03.3019
4 mm	PA.01.03.3021
6 mm	PA.01.03.3023
8 mm	PA.01.03.3025
10 mm	PA.01.03.3027



Mini placa orbital

6 furos	PA.01.03.0957
8 furos	PA.01.03.0958
10 furos	PA.01.03.0959



Mini placa reta dupla ponte

10,5mm - 8 furos	PA.01.03.1013
13,5mm - 8 furos	PA.01.03.1014
16,5mm - 8 furos	PA.01.03.1015



Mini placa L DF

4 furos	PA.01.03.0733
6 furos	PA.01.03.0735



Mini placa L ponte DF

9mm - 4 furos	PA.01.03.0759
12mm - 4 furos	PA.01.03.0761
18mm - 4 furos	PA.01.03.0765
9mm - 6 furos	PA.01.03.0813



Mini placa L oblíqua ponte DF

9mm - 6 furos	PA.01.03.0920
---------------	---------------



Mini placa sagital

PA.01.03.1011



Mini placa dupla angulada 20° BSSO ponte DF

10,5mm - 8 furos	PA.01.03.0684
13,5mm - 8 furos	PA.01.03.0685
16,5mm - 8 furos	PA.01.03.0686

* Disponibilidade de outras medidas sob consulta.



Mini placa Y

5 furos

PA.01.03.1154



Placas com escariado dupla face eliminam a necessidade de geometrias específicas para o lado direito ou esquerdo.



Mini placa T

4 furos

PA.01.03.1046

6 furos

PA.01.03.1048



Mini placa T orbital ponte

9mm - 8 furos

PA.01.03.1276

PARAFUSOS

Parafuso Cortical AP 2,0mm

TI cross drive



4 mm PA.01.03.0256

5 mm PA.01.03.0257

6 mm PA.01.03.0258

8 mm PA.01.03.0260

Parafuso Cortical 2,0mm

TI Cross Drive



10 mm PA.01.03.0080

12 mm PA.01.03.0082

14 mm PA.01.03.0084

16 mm PA.01.03.0086

Parafuso Cortical 2,3mm

TI Cross Drive



5 mm PA.01.03.0092

6 mm PA.01.03.0093

8 mm PA.01.03.0095

10 mm PA.01.03.0097

12 mm PA.01.03.0099

Parafuso de Bloqueio AP

TI Cross Drive



4 mm PA.01.03.0256

5 mm PA.01.03.0257


6 mm PA.01.03.0258

8 mm PA.01.03.0260

* Outros comprimentos sob consulta.

ORIENTAÇÕES PARA INSERÇÃO DE PARAFUSOS DO SISTEMA BUCOMAXILO FACIAL 2.0

PARAFUSO CORTICAL AP 2.0 CROSS DRIVE (AUTOPERFURANTE)

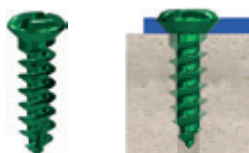

Perfurar com broca 1.1mm

PARAFUSO CORTICAL 2.0 CROSS DRIVE (AUTOROSCANTE)




Perfurar com broca 1.5mm

IMPORTANTE

Durante o período de consolidação óssea devem ser evitadas pressões excessivas sobre o implante, de modo a prevenir falha no desempenho do sistema de fixação. A fixação em osso cortical é essencial para que ocorra estabilidade primária. A ausência ou fina espessura de osso cortical, poderá resultar em falha no desempenho do sistema de fixação. É fundamental a irrigação local durante o processo de perfuração para minimizar riscos de complicações cirúrgicas, como osteonecrose térmica.

■ SISTEMA CRANIOMAXILOFACIAL

■ OPÇÕES DE GEOMETRIAS AVULSAS

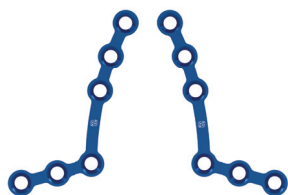

Micro Placa L Orbital Oblíqua ponte 10mm #0,7

direita	PA.01.03.2927
esquerda	PA.01.03.2928

Micro Placa L Orbital Oblíqua ponte 14mm #0,7


direita	PA.01.03.2929
esquerda	PA.01.03.2930



Micro Placa Suporte Zigomático


direita	PA.01.03.2522
esquerda	PA.01.03.2523

■ PLACAS ORBITAIS AVULSAS

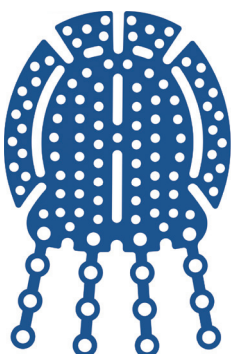


Assoalho orbital

PA.01.03.0650

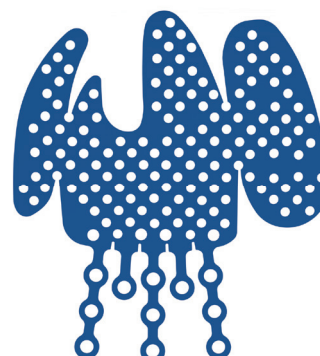


Micro malha para assoalho de órbita

#0,3mm	PA.01.03.2611
#0,5mm	PA.01.03.2612

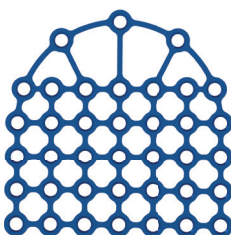

Micro malha assoalho orbital portal pequeno

PA.01.03.2609

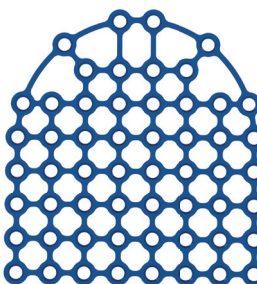

Micro malha assoalho orbital portal grande

PA.01.03.2610




Mini placa reta ponte Tab

12mm - 4 furos	PA.01.03.2586
16,5mm - 4 furos	PA.01.03.2587



Mini placa corte sagital oblongo

ponte 9mm	PA.01.03.2940
ponte 13mm	PA.01.03.2942
ponte 16mm	PA.01.03.2944

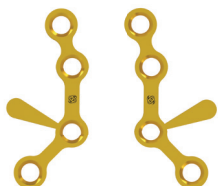

Mini placa L ponte Tab

ponte 13,5mm - esquerda	PA.01.03.2599
ponte 13,5mm - direita	PA.01.03.2603
ponte 17,5mm - esquerda	PA.01.03.2600
ponte 17,5mm - direita	PA.01.03.2604



Mini placa para mento Chin Tab

sem avanço	PA.01.03.2590
avanço 2mm	PA.01.03.2591
avanço 4mm	PA.01.03.2593
avanço 6mm	PA.01.03.2595
avanço 8mm	PA.01.03.2596
avanço 10mm	PA.01.03.2597



Mini placa trapezoidal

PA.01.03.2957



Mini placa trapezoidal paralela

PA.01.03.2997



Mini placa lambda dupla face

PA.01.03.3010




Mini placa suporte dupla face


PA.01.03.3011

■ SISTEMA CRANIOMAXILOFACIAL

■ MÓDULO 1.5 | 2.0

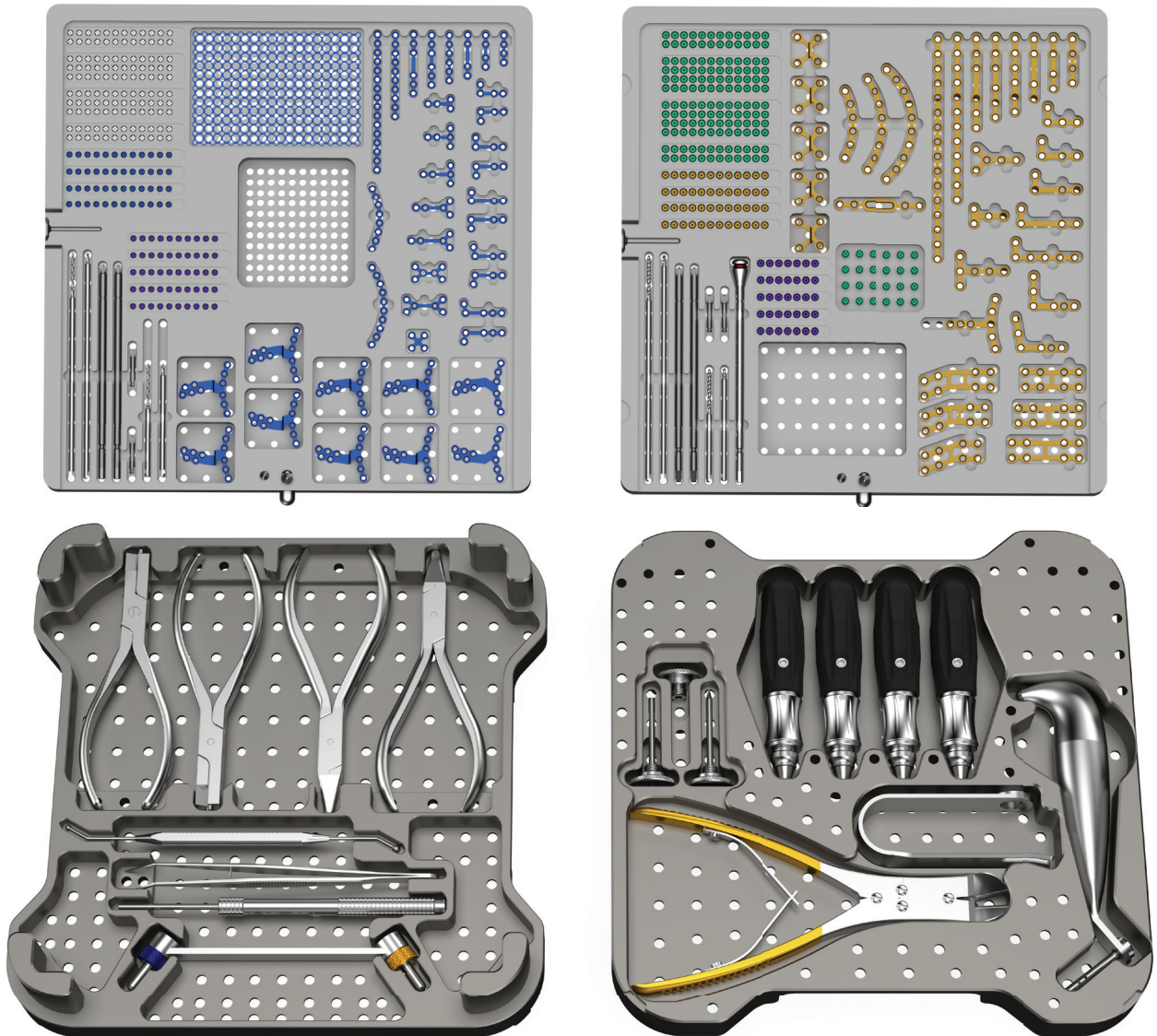

■ MÓDULO COMPACTO

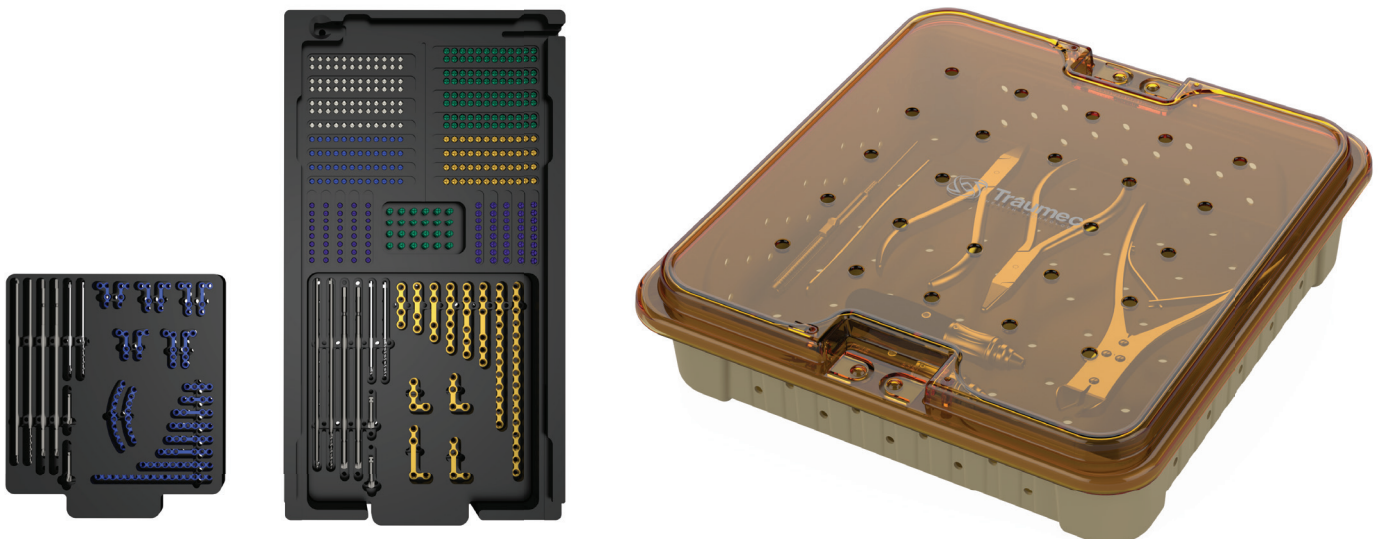



+55 (19) 3522-1177

vendas@traumec.com.br

contato@traumec.com.br

export@traumec.com.br

traumec.com.br

De acordo com a legislação vigente aplicável,
o uso deste produto deverá ocorrer sob
responsabilidade médica. Imagens meramente
ilustrativas. Rev. 6/ jun2021